

Notice bain-marie (réf :21200017)

Bain-marie pour la mise à température de vos doses avant insémination

Important

- 1 Avant chaque nettoyage ou maintenance, enlever la prise reliant l'appareil au secteur.
- 2 Ne pas utiliser d'objets pointus ou coupants quand vous nettoyez l'appareil car vous pouvez endommager l'appareil.
- 3 Attention à ne pas verser du liquide sur le boîtier de contrôle de température.
- 4 Ne pas introduire de gaz ou de produits inflammables à l'intérieur de l'appareil pour éviter une explosion.
- 5 Quand vous déplacez l'appareil, prendre soin de bien retirer la prise du secteur.
- 6 Avant de connecter la prise au secteur, vérifier que la tension de celle-ci corresponde aux caractéristiques du produit. Ce produit sort du lieu de fabrication avec une prise EURO. En cas de changement de prise, suivre le code de couleur suivant.

Câble bleu	Neutre
Câble marron	Phase
Câble jaune vert	Terre
- 7 Ne pas mettre en marche le bain marie sans qu'il ne soit connecté à la terre
- 8 **Ne pas brancher le bain marie sans qu'il ne contienne de l'eau**

Transport et déballage

- Déballer l'appareil et vérifier qu'il ne soit pas abîmé.
- Informer immédiatement votre fournisseur dans le cas contraire.
Dans ce cas, laisser-le dans l'emballage.

Nettoyage

- Enlever tous les morceaux de papier adhésif qui protègent les parties internes de l'appareil.
- Laver l'intérieur de l'appareil en utilisant de l'eau tiède et un savon à PH neutre.
- Attention à ne pas verser du liquide à l'intérieur de l'unité de contrôle de température.
- Utiliser une peau de chamois ou une microfibre
- Après nettoyage, sécher la superficie

Lieu d'utilisation

Mettre l'appareil sur une surface plane et horizontale

Mise en marche

- 1 Remplir d'eau le bain marie à un niveau inférieur à 2cm au dessus de la plaque qui protège la résistance
- 2 Mettre l'appareil sous tension
- 3 Actionner l'interrupteur principal qui illumine l'écran
- 4 Sélectionner la température en suivant les indications suivantes

Ajustement de la température

- 1 Appuyer et lâcher la touche SET. Sur l'écran, vous verrez SP et la valeur programmée par intermittence.
- 2 Pour modifier, appuyer sur la touche (qui va vers le bas ou le haut) de manière rapide.
- 3 La sortie du mode d'ajustement SET, se produit automatiquement, si vous n'appuyez pas en moins de 5 secondes sur les touches.

Important

- Ne pas rester appuyer sur SET plus de 5 secondes pour ne pas changer le menu de configuration ce qui aurait pour cause de provoquer le mauvais fonctionnement de l'appareil.

Maintenance

Nettoyage

- 1 Déconnecter le bain marie de la prise avant de procéder à quelconque travail de réparation ou maintenance.
- 2 Il est recommandé de nettoyer l'intérieur de l'équipement après chaque utilisation
La qualité de l'eau employée déterminera la durée de vie de la résistance
- 3 Vérifier la superficie de la résistance et s'assurer qu'elle n'est pas abîmée.
- 4 Ne pas utiliser de produits de nettoyage qui sont abrasifs ou qui contiennent de l'ammoniac
- 5 Après avoir nettoyé l'appareil, vous pouvez le remettre sous tension.

Garantie

- Garantie 2 ans constructeur contre tout défaut de fonctionnement provenant de la fabrication.
- La garantie n'inclus pas les accidents dus à la mauvaise utilisation de l'appareil.
- La garantie ne couvre pas les dysfonctionnements occasionnés par le transport ou si l'appareil n'a pas été connecté à une prise de courant avec un bon dispositif de prise de terre.
- De même, la garantie est annulée si l'appareil a été manipulé par du personnel non autorisé.

Caractéristiques techniques

Capacité : 12L

Précision : + ou – 1°C

Dimensions extérieures : 295*430*226 mm

Poids : 2.38kg

Contrôle de la température : Digital- Electronique

Consommation : 850W